

MICROSTAR[®] Easy-Fix[™]



Materiale refrattario pronto all'uso per la preparazione di supporti di cottura individuali

Easy-Fix è un materiale refrattario pronto all'uso per la preparazione di supporti di cottura individuali. Con la sua consistenza morbida e cremosa garantisce straordinarie caratteristiche di lavorazione che consentono all'odontotecnico di fissare facilmente Inlay, Onlay, Veneer, corone e ponti su pin o direttamente sul supporto di cottura.



I manufatti ceramici pressati che presentano rotture possono essere posizionati saldamente con il materiale refrattario e inseriti nel forno sul supporto di cottura per una cottura di correzione. La precisione resta invariata, la deformazione delle spalle e dei margini durante la cottura è ormai un problema superato.



Codice

Microstar Easy Fix	3 siringhe	20/0550
Microstar Easy Grip		20/0500



Riparazione di pezzi pressati

Preso sicuro con **Easy-Grip™**



1

Applicazione della pasta **Easy-Fix™**



2

Manufatto da cuocere perfettamente fissato



3

Manufatto pressato riparato



4

Fissaggio di manufatti in ceramica integrale

Applicazione della pasta **Easy-Fix™**



5

Posizionamento sul supporto di cottura



6

Manufatto pressato dopo la cottura



7

Rimozione di **Easy-Fix™**



8

Fissaggio di manufatti in metaloceramica

Modellazione delle spalle prima della cottura



9

Riempimento con pasta **Easy-Fix™**



10

Ponte prima della cottura delle spalle



11

Ponte dopo la cottura delle spalle



12

Distribuito da:

Defra
DENTAL
LA TECNOLOGIA DEL DENTISTO

DEFRADENTAL s.r.l.
Via Liguria, 38 - 37060 Lugagnano di Sonà (VR)
Telefono: 045-8182811 - Fax: 045-567005
marketing@defradental.it - www.defradental.it



www.zubler.de

Zubler Gerätebau GmbH
Buchbrunnweg 26
D-89081 Ulm-Jungingen
Telefon +49(0)731-14 52 0

B00145 / 11-2011



CE